

Empfohlene i-scan-Einstellungen  
für die Pneumologie.

**Mit der  
richtigen  
Einstellung ist  
alles ganz  
einfach!**

# Empfohlene i-scan-Einstellungen für die Pneumologie.

## i-scan 1 (SE)

Helligkeit	0
Mittel/Spitze	Mittel
Blau	0
Rot	0
Verstärkung	mid/+4
SE	+4
CE	aus
TE	aus

Akzentuierung von Oberflächenstrukturen, unterstützt die Detektion

## i-scan 2 (SE + TE)

Helligkeit	+1
Mittel/Spitze	Mittel
Blau	0
Rot	0
Verstärkung	mid/+4
SE	+4
CE	aus
TE	c

Farbtonverstärkung, unterstützt die Abgrenzung und Charakterisierung

## i-scan 3 (SE + TE)

Helligkeit	+1
Mittel/Spitze	Mittel
Blau	0
Rot	0
Verstärkung	mid/+4
SE	+4
CE	aus
TE	v

Farbtonverstärkung mit Kontrastverstärkung, unterstützt die Charakterisierung und die Bestimmung von Biopsiebereichen