

OPTIVISTA

Videoprozessor EPK-i7010

Eine einzigartige Kombination digitaler und optischer Bildoptimierung zur besseren *in-vivo* Diagnose.

www.pentaxmedical.com

Bewährte i-scan-Einstellungen

Videoprozessor OPTIVISTA EPK-i7010

Optimieren Sie Ihre i-scan-Einstellungen, um Anomalien besser detektieren, charakterisieren und abgrenzen zu können.

	i-scan 1 Profil	i-scan 2 Profil	i-scan 3 Profil
	i-scan SE	i-scan TE	i-scan OE 1
Helligkeit	+1	+1	+1
Mittel-/ Spitzenwert	0	0	0
Blau	0	0	0
Rot	0	0	0
Verstärkung	+2	+2	+4
SE	+5	+4	NA
CE	Aus	Aus	NA
TE	Aus	C	NA
OE	Aus	Aus	Mode 1
Kontrast		Modus 2	
Rauschunterdrückung		Niedrig	
Belichtungserweiterung		Mittel	
	Unterstützt Detektion	Unterstützt Charakterisierung und Abgrenzung von Mustern	Unterstützt die Gefäßcharakterisierung